


Cutímetro Nr. 33869.00 – análogo

El cutímetro Nr. 33869 es un equipo de medición para medir el espesor del piel en el ganado vacuno después de la tuberculinización. Lo tiene un largo de 15 cm, y además sirve para acondicionar las tetas de vacas lecheras.

El cutímetro, bien conocido en acciones veterinarias de tuberculinización, está compuesto de dos piernas con soportes prolongados. Las dos piernas están definidas por medio de un resorte de tracción. El puño de pistola facilita la aplicación de este equipo; en su parte posterior la pierna movable se puede fijar mediante de un tornillo de ajuste para leer bien el resultado posteriormente, evitando de manejar el piel de la vaca.

Al practicar la tuberculinización primeramente tiene que afeitar el piel al cuello en su lugar preferido. Entonces se toma el piel formando una arruga para su medición por el cutímetro. Ahora se coloca las piernas alrededor de la arruga y se mide el espesor estándar. El resultado en milímetros es de leer en una escala (nonius) y adicional en su línea superior – donde se encuentran las dos líneas exactamente - en 1/10 milímetros. Este resultado es de anotar en una lista.

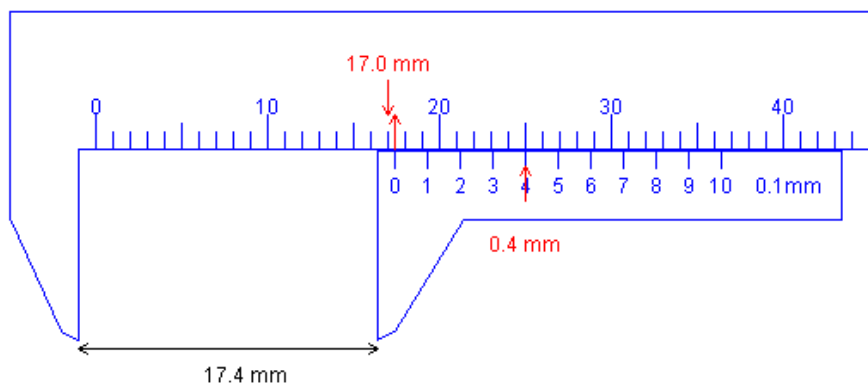

Ahora la vacunación, utilizando 0.1 cc "Bovin Tuberculin" inyectado intracutan, es de hacer. Después de 72 horas se mide la reacción del animal. En el caso negativo el piel no muestra una hinchazón en la punta de la vacunación, o solamente una pequeña hinchazón (menos de 2 mm). En el caso positivo el piel muestra una hinchazón considerable, es decir de 4 mm y más.

Otra vez se mide el espesor del piel anotándolo en la lista. El resultado tiene que ser comparado en la lista para juzgar la diagnosis.